


# Pourquoi le SCULPT 3D® ?

Une technique d'Avant Garde: l'Alliance unique des ULTRASONS & des LEDS

De par la pertinence de ses résultats, SCULPT 3D® Génération III est devenu en quelques années le leader incontesté en France, Suisse & Bénélux des ultrasons de basse fréquence contrôlée.

## LA CAVITATION: l'alternative douce à la liposuccion

La cavitation utilise les ultrasons de basse fréquence pour éliminer radicalement les cellules grasses, une alternative sérieuse à la liposuccion. La graisse détruite s'évacue par voie naturelle. Lutte contre le relâchement cutané, les amas gras, la cellulite.

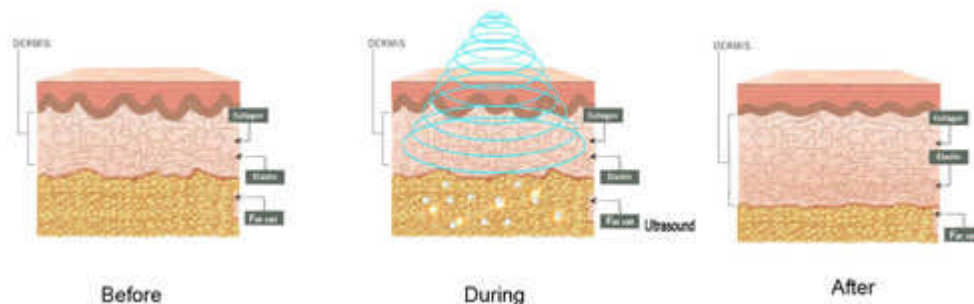

## ULTRASONS DE BASSE FREQUENCE

Les ultrasons stimulent en profondeur les cellules de votre peau (visage ou corps) par l'intermédiaire des vibrations que l'ultrason ; C'est l'action mécanique.

L'action mécanique en détail : les ultrasons pénètrent sous la peau et provoquent des vibrations à 1 Mhz. L'alternance des pressions et dépressions a pour effet un micro-massage des cellules.

L'onde s'infiltré jusqu'au niveau de l'hypoderme où se situe le stockage des graisses. Les cellules entrent en vibration et s'échauffent ce qui contribue à l'élimination des graisses.

Les ultrasons ravivent l'éclat et nettoient votre peau en profondeur. C'est l'action nettoyante.

L'action nettoyante en détail : les micro-vibrations permettent d'éliminer les cellules mortes, les résidus et polluants profonds qui ne peuvent être éliminés par un nettoyage classique. Les ultrasons agissent également sur la mélanine de la couche supérieure de l'épiderme pour vous permettre de retrouver un teint plus éclatant.

Les ultrasons régénèrent la peau et la rendent plus résistante. C'est l'effet thermique.

L'alternance des compressions et expansions provoquées dans les tissus (différences de pression) par les ultrasons se traduit généralement par un effet thermique. La chaleur produite par friction provoque une vasodilatation des tissus. Cette chaleur intense se diffuse. Les effets biologiques constatés sont variés. Les effets biologiques constatés sont variés : activation de la circulation sanguine et lymphatique, relaxation musculaire.

SCULPT 3D® émet des ultrasons de basse fréquence, jusqu'à 43 KHz, pour briser les cellules des tissus adipeux de façon sélective et définitive. L'effet cavitation produit des microbulles d'air dans les tissus adipeux, qui s'agrandissent jusqu'à imposer en émettant des ondes de choc capables de casser les membranes des cellules ciblées et libèrent les graisses qui y sont stockées.

## LEDS DE COULEUR ROUGE

Les LEDS ou chromothérapie et l'héliothérapie (thérapie par les rayons solaires) ont joué un rôle important dans les médecines traditionnelles de l'Inde, de la Chine et de la Grèce. Pour chaque élément de matière, il existe une fréquence vibratoire énergétique spécifique qui correspond à une couleur bien définie. Les développements de la physique ont permis d'affirmer que les photons lumineux sont des particules nutritives de la vie (sans soleil pas de vie !). L'impact du rayonnement des couleurs et de la lumière influence directement le comportement des cellules et du système nerveux neuro-végétatif

<b>ROUGE</b>	Tonifie et raffermi, amélioration de l'aspect de la peau, régénération des tissus, stimulation de la production de collagène ; activation des fibroblastes, élastine et collagène. Idéale pour lutter contre le manque de tonicité.
--------------	---

## DUREE DU TRAITEMENT

Selon ses concepteurs, la durée du traitement du SCULPT 3D® varie en fonction de la zone à traiter. Une séance de 30 /45mn est idéale pour affiner, tonifier, galber et sculpter culotte de cheval, cuisses, fessier, abdomen; suivant les zones à traiter 6 à 8 séances suffisent pour éliminer radicalement les cellules grasses emprisonnées dans les tissus.

## LES 10 POINTS CLES du SCULPT 3D®

1. LIPOCAVITATION & LED. Cavitation calibrée Generation III.

2. **ULTRASONS 1/3- 2/3- 3/3 en Mode SPOT ou CONTINU & LED SIMULTANE.**
3. **Interface intuitive et facilité d'utilisation (programmes pré établis et libres).**
4. **AUCUN FRAIS CACHE, PAS D'ACCESOIRES OU MACHINE EN SUPPLEMENT.**
5. **APPAREIL LE PLUS RENTABLE DU MARCHÉ et RAPIDE RETOUR SUR INVESTISSEMENT.**
6. **NON INVASIF & TOTALEMENT INDOLORE, PAS D'EFFETS SECONDAIRES.**
7. **RESULTATS GARANTIS & MESURABLES par impédance mètre .**
8. **GARANTIE 1 AN & SAV DERMOTECH 24H00.**
9. **PAS DE PRODUITS COSMETIQUES A UTILISER (pas d'interférence avec les marques de cosmétiques utilisés avant et après le soin SCULPT 3D®).**
10. **Etudes cliniques certifiées UTILISATION SANS RISQUE POUR LES METIERS DE L'ESTHETIQUE**

**SCULPT 3D® ne nécessite AUCUN entretien et AUCUNES dépenses cachées.**

## **CARTE DE SOINS SCULPT 3D® :**

**CELLULITE OEDEMATEUSE, CELLULITE FIBREUSE, CELLULITE ADIPEUSE, ABDOMEN, CULOTTE DE CHEVAL, FESSIERS, CUISSES, GENOUX, BRAS ET INTERIEUR DES BRAS.**

## **FAQ**

**QUE DEVIENT LA GRAISSE ?** Les triglycérides qui composent les cellules se dispersent dans les liquides intracellulaires et sont transportées jusqu'au foie à travers le système lymphatique et circulatoire. Elles seront ensuite éliminées physiologiquement par voie naturelle; il est recommandé de boire abondamment avant et après le soin.

**QUELS RESULTATS PEUT-ON OBTENIR ?** Résultats efficaces et excellents pour l'élimination de la cellulite et de la graisse localisée en un seul mois, permettant le remodelage de la silhouette là où on le désire. Visible dès la première séance et dans certains cas on perd même jusqu'à 3 cm (selon le client : santé, diète, exercice).

### **QUELLE DIFFERENCE EXISTE-T-IL ENTRE L'ULTRASON A 1-2-3 MHz ET L'ULTRASON DE BASSE**

**FREQUENCE ?** L'ultrason traditionnel à haute fréquence était autrefois utilisé dans le secteur médical (physio thérapeutique) pour réaliser des traitements de réhabilitation. Plus tard, ces ultrasons ont également été utilisés dans le secteur esthétique pour traiter les problèmes causés par la cellulite de la même manière que les ultrasons à basse fréquence. La différence principale est l'intensité de l'EFFET CAVITATIONNEL qui est beaucoup plus importante lorsque les fréquences sont plus basses.

**QUELLE SENSATION RESSENT-ON PENDANT LE TRAITEMENT ? Le traitement est garanti SUR, EFFICACE et SANS DOULEUR** et le ou la client(e) ne ressentira qu'un faible bruit ou sifflement au niveau des oreilles.(celui ci est parfaitement supportable et ne provoque aucuns effets secondaires).

**COMBIEN DE SEANCES ?** tout dépend de la zone à traiter mais 6 à 12 séances suffisent pour éliminer définitivement les amas graisseux; il est recommandé de respecter une hygiène de vie.

**Y A-T-IL DES CONTRE-INDICATIONS ?** Le SCULPT 3D® est sans danger d'utilisation sur tout type de peaux et en toute saison. Le traitement ne convient pas aux personnes porteuses d'un pacemaker, d'un défibrillateur, d'implants métalliques, épileptiques, enceintes ou personnes atteintes de tumeurs ou suivies par une procédure chirurgicale.

**EXISTE-T-IL DES ZONES QUI NE PEUVENT PAS ETRE TRAITEES ? Tête et cou, aisselles, creux du genou, mains, visage, décolleté, poitrine, organes génitaux, chevilles, pieds.**

**QUELS RESULTATS OBTIENT-ON AVEC CE TRAITEMENT ?** Réduction de la circonférence de la zone traitée Surface cutanée plus lisse. Tissu adipeux plus homogène. Les résultats sont visibles et durables dès la première séance et mesurables par impédance mètre.

**REPLACE-T-IL LA LIPOSUCCION ?** La lipo cavitation, dans le domaine esthétique est considérée comme une alternative douce et non invasive à la liposuction dans les cas moins graves mais elle peut être aussi réalisée comme complément.

**QUELLE EST LA GARANTIE DANS L'APPLICATION DES PROTOCOLES D'UN CENTRE A L'AUTRE ?** Tous les centres équipés du SCULPT 3D® sont des professionnels de l'esthétique et sont agréés par le Groupe Dermotechnic; ils ont tous suivis une formation spécifique à nos protocoles corps. Notre chartre qualité garanti ces prestations et chaque centre agréé doit afficher son numéro d'agrément ainsi que son diplôme professionnel et sa date de formation.

**L'APPAREIL SCULPT 3D® REpond IL AUX NORMES DE SECURITE ?** Le SCULPT 3D® est conforme aux normes françaises en vigueur AFNOR, NF, CE et répond à différentes normes internationales de sécurité et de qualité telles que TUV, GMP, et ICR.

©Copyright DERMOTECHNIC® 2011



[www.cavitationsculpt3d.com](http://www.cavitationsculpt3d.com)